



Lo inteligente nunca había sido
tan simple

Primeros pasos:
Procesador de sonido
Cochlear™ Nucleus® Kanso® 2⁺



Cómo elige conectarse con su mundo es algo muy personal.

Por eso es que ofrecemos una variedad de soluciones auditivas, opciones de uso y accesorios.


Por ende, si prefiere un procesador de sonido que se coloque por fuera de la oreja, encontrará una opción de Cochlear que se adapte a su estilo de vida, como el procesador de sonido **Nucleus® Kanso® 2**.

Creado a partir del galardonado diseño todo en uno del procesador de sonido Kanso¹, el Kanso 2 presenta transmisión directa* y uso de la aplicación Nucleus Smart** desde teléfonos inteligentes compatibles, una pila recargable integrada y la más alta resistencia al polvo y al agua+ (IP68) para disfrutar de una mayor tranquilidad.



Procesador de sonido
Nucleus® Kanso® 2

Componentes principales del procesador de sonido Kanso 2

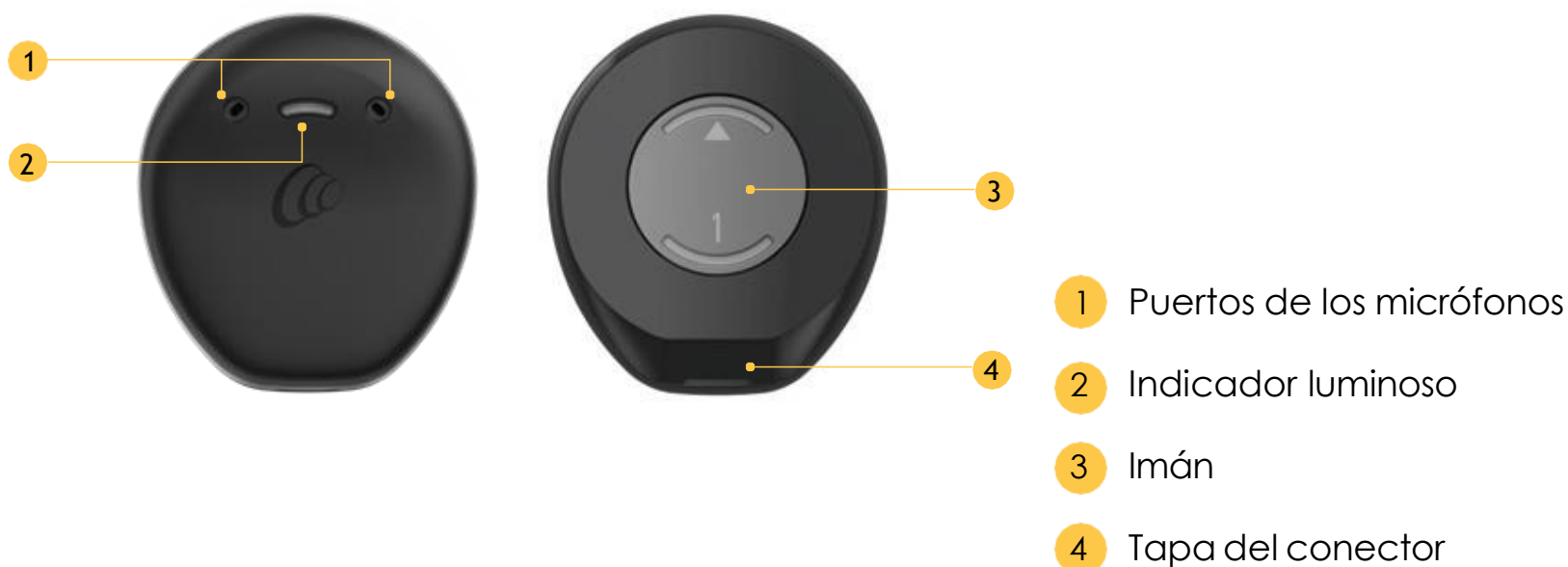

Colores disponibles



Negro, Marrón Chocolate, Gris Pizarra, Rubio Arena, Plata

Pegatinas de personalización*



*Aplica para kits de usuarios pediátricos




Avances simples e inteligentes

Control automático y sin botones



Batería recargable incorporada

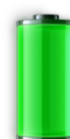

+18 horas

El cargador para el hogar con unidad de secado incorporada



Aumento de la protección contra la humedad y el polvo[#]



Cargador portátil para uso sobre la marcha



Céntrese en lo que es importante

Ya sea que se encuentre en un lugar ruidoso, un parque, en un día ventoso o en una oficina tranquila, deje que el procesador de sonido haga el trabajo al adaptarse automáticamente a su entorno.

SmartSound® iQ con SCAN analiza el entorno y se ajusta para ayudar a optimizar su audición.¹⁻⁴

El procesador de sonido Kanso 2 cuenta con tecnología avanzada diseñada para ayudarle a experimentar un sonido claro, incluso en entornos desafiantes y ruidosos.¹⁻⁴



Habla: le ayuda a escuchar el habla con mayor claridad.



Habla en entornos ruidosos: ayuda a mantener conversaciones en entornos ruidosos.



Ruido: le ayuda a escuchar en situaciones ruidosas.



Viento: le ayuda a escuchar en situaciones en las que hay viento.



Silencio: le ayuda a escuchar sonidos suaves en entornos tranquilos.



Música: le ayuda a disfrutar de la música que le encanta.

Además de las funciones automáticas de SCAN, puede activar ForwardFocus[^] en la aplicación Nucleus Smart^{**}. Dado que está diseñado para mejorar las conversaciones cara a cara en entornos particularmente desafiantes, reduce los ruidos molestos que provienen de atrás de usted, para que pueda escuchar mejor a la persona que se encuentra delante de usted.^{5,6}

Cuenta con dos micrófonos, que filtran el ruido de fondo y ofrecen un mejor rendimiento auditivo que un solo micrófono.⁴


Conexión sin concesiones

El procesador de sonido Kanso 2 ofrece transmisión directa desde dispositivos compatibles* con Apple y Android™, con los que puede disfrutar de llamadas de streaming, música y entretenimiento directamente al procesador de sonido sin dispositivos adicionales o cables, permitiéndole conectarse a lo que más disfruta.

Añada dispositivos True Wireless™ de Cochlear para disfrutar de control de volumen independiente al mirar televisión con amigos o familiares, conectarse a dispositivos Bluetooth® y puede ayudarle a participar de forma más activa en reuniones y debates de clase. Mejoran el rendimiento auditivo, al llevar la señal que está escuchando directamente al procesador de sonido, incluso si está lejos o en un entorno ruidoso.

El Cochlear Wireless Mini Microphone 2/2+ y el Cochlear Wireless TV Streamer puede acercarle al sonido mediante la transmisión de audio de alta calidad directamente a su procesador de sonido.

Con el Cochlear Wireless Phone Clip, puede transmitir audio desde cualquier dispositivo Bluetooth®, como un ordenador portátil. Si tienen un teléfono inteligente compatible, puede controlar sus dispositivos True Wireless™ directamente desde la aplicación Nucleus Smart.

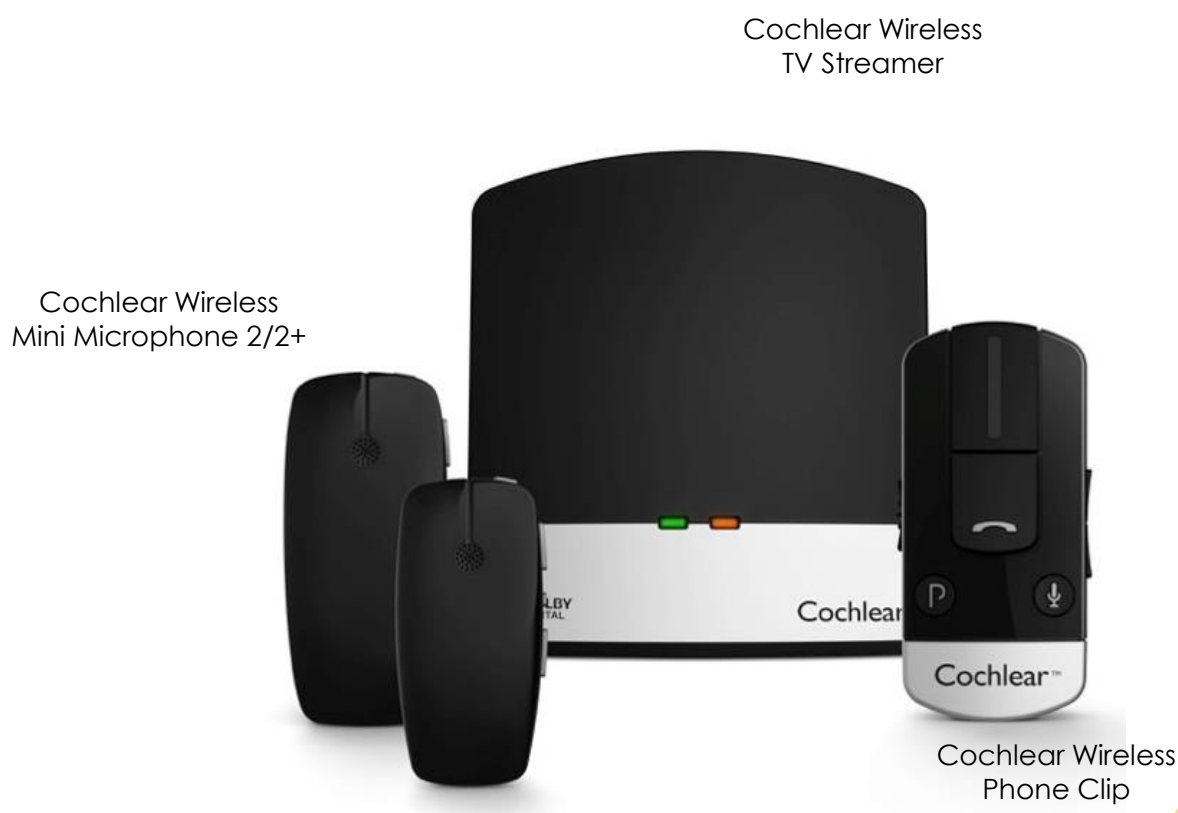

Conéctese con lo que ama

Con la aplicación Nucleus Smart** podrá controlar el volumen de su procesador de sonido, activar programas y filtros, fuentes de audio, activar ForwardFocus, monitorear el estatus de la batería y del procesador de sonido directamente desde un dispositivo Apple o Android™ compatible*.

Gracias a la función «Seguimiento auditivo» podrá establecer objetivos auditivos personalizados y usar la herramienta «Sound Check» para comprobar el funcionamiento de los micrófonos del dispositivo de un ser querido. Además, la aplicación también permite localizar un procesador de sonido extraviado, tener acceso a la atención médica a través del cuidado remoto†, así como acceder a las actualizaciones de dispositivos.


Asuma el control con la aplicación Nucleus Smart



Controle y supervise su procesador de sonido



Realice el seguimiento de su progreso auditivo

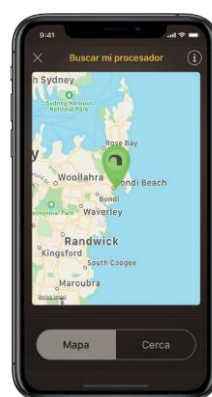

Localice un procesador de sonido extraviado



Llévelo puesto con toda confianza

Para una mayor tranquilidad, tiene a su disposición una gama de opciones para llevar puesto su procesador de sonido, para permitir que usted o sus hijos puedan tener un estilo de vida activo.



Banda para la cabeza



Cordón de Seguridad Mediano



Kanso Halo



Cordón de Seguridad Largo



Cordón de Seguridad Corto



Cordón de Seguridad Bucle Corto



Línea de seguridad con clip para cabello



Donde sea que la vida le lleve

Para mayor tranquilidad, añade **Cochlear Aqua+** para hacer que su procesador de sonido Kanso 2 sea resistente al agua# ¡para que pueda zambullirse y disfrutar del sonido del chapoteo!

Con **Cochlear Aqua+**, su procesador de sonido Kanso 2 puede sumergirse hasta 3 metros durante un máximo de 2 horas, para que pueda nadar, hacer snorkel o surf con confianza en agua salada, dulce y clorada#.

Hear now. And always

Como líder mundial en soluciones auditivas implantables, Cochlear se dedica a ayudar a personas con hipoacusia, de moderada a profunda, a experimentar una vida en la que puedan escuchar más plenamente. Proporcionamos más de 750 000 dispositivos implantables para ayudar a personas de todas las edades a escuchar y conectarse con las oportunidades de la vida.

Procuramos brindar a las personas la mejor experiencia auditiva durante toda la vida, así como acceso a las innovaciones tecnológicas del futuro. Tenemos las mejores redes clínicas, de investigación y de apoyo.

Es por eso que más personas eligen Cochlear en lugar de otras empresas de implantes auditivos.

Referencias

1. Good Design. 2017. Kanso Cochlear Implant Sound Processor - Good Design. [en línea] Disponible en: <<https://good-design.org/projects/kansocochlear-implant-sound-processor/>> [Consultado el 20 de abril de 2020].
2. Mauger SJ, et al. Clinical evaluation of the Nucleus 6 cochlear implant system: performance improvements with SmartSound iQ. Int J Audiol. 2014, Aug; 53(8): 564-576.
3. Wolfe J, et al. Benefits of Adaptive Signal Processing in a Commercially Available Cochlear Implant Sound Processor. Otol Neurotol. 2015 Aug;36(7):1181-90.
4. Mauger SJ, et al. Clinical outcomes with the Kanso off-the-ear cochlear implant sound processor. Int J Audiol. 2017, Apr; 56(4): 267-276. [Patrocinado por Cochlear].
5. Cochlear Ltd. D1660797. CP1150 Sound Processor Interim Clinical Investigation Report. 2020; January.
6. Cochlear Limited. D1376556. CLTD 5709 Evaluación clínica del sistema de implante Cochlear Nucleus 7. 2018, January.

↪ Procesador de sonido Nucleus Kanso 2 hace referencia al procesador de sonido Kanso 2 (CP1150).

El procesador de sonido Kanso 2 es resistente al agua y al polvo hasta el nivel IP68 del estándar internacional IEC60529 y puede sumergirse de forma continua en agua hasta una profundidad de 1 metro durante un máximo de 1 hora. El procesador de sonido Kanso 2 con Aqua+ es resistente al agua y al polvo hasta el nivel IP68 del estándar internacional IEC60529 y puede sumergirse de forma continua en agua hasta una profundidad de 3 metros durante un máximo de 2 horas. Consulte las guías de usuario correspondientes para más información.

* El procesador de sonido Cochlear Kanso 2 son compatibles con dispositivos Apple y Android.

**La aplicación Nucleus Smart de Cochlear está disponible en App Store y en Google Play. Para obtener información sobre compatibilidad, visite www.cochlear.com/compatibility

^ ForwardFocus es una función activada por el especialista clínico y controlada por el usuario.

† *No se encuentra disponible en todos los mercados.

■ Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia T: +61 2 9428 6555 F: +61 2 9428 6352
Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland T: +41 61 205 8204 F: +41 61 205 8205
Cochlear Latinoamérica S.A. International Business Park, Building 3835, Office 403, Panama Pacífico, Panama T: +507 830 6220 F: +507 830 6218
Cochlear Colombia S.A.S. AK 9 #115-06, Oficina 1201 Edificio Tierra Firme Bogotá, Colombia T: +57 1 7563346
Cochlear México S.A. de C.V. Avenida Tamalipas No. 150-A Piso 9. Col. Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, C.P. 06170 México, D.F. T: +52 55 5211 8714

www.cochlear.com/la    

Este material está destinado a los profesionales de la salud. Si usted es un consumidor, pida consejo a su profesional de la salud acerca de los tratamientos para la hipoacusia. Los resultados pueden variar, y el profesional de la salud le indicará qué factores pueden afectar sus resultados. Lea siempre las instrucciones de uso. No todos los productos están disponibles en todos los países. Si desea obtener información sobre los productos, póngase en contacto con el representante local de Cochlear.

El procesador de sonido Kanso 2 es resistente al agua y al polvo hasta el nivel IP68 del estándar internacional IEC60529 y puede sumergirse de forma continua en agua hasta una profundidad de 1 metro durante un máximo de 1 hora. El procesador de sonido Kanso 2 con Aqua+ es resistente al agua y al polvo hasta el nivel IP68 del estándar internacional IEC60529 y puede sumergirse de forma continua en agua hasta una profundidad de 3 metros durante un máximo de 2 horas. Consulte la guía de usuario correspondiente para más información. El procesador de sonido Nucleus Kanso 2 de Cochlear es compatible con dispositivos Apple y Android. La aplicación Nucleus Smart App de Cochlear está disponible en el App Store y en Google Play. Para obtener información sobre compatibilidad, visite www.cochlear.com/compatibility.

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Slimline, SmartSound, Softip, SPrint, True Wireless, el logotipo elíptico, y Whisper son marcas comerciales o marcas registradas de Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, DermaLock, EveryWear, Vistafix y WindShield son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Apple, el logotipo Apple, FaceTime, el logotipo Made for iPad, el logotipo Made for iPhone, el logotipo Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc, registrada en EE. UU. y en otros países. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google LLC. El robot de Android se reproduce o modifica a partir del trabajo creado y compartido por Google y se utiliza conforme a las condiciones de la licencia de atribución de Creative Commons 3.0. ReSound es una marca comercial de GN Hearing A/S.

© Cochlear Limited 2021. D2189155 Primeros pasos Cochlear Nucleus Kanso 2